



Het vullen van het infuussysteem en het filter.

1. Verwijder het beschermstukje van het NaCl 0,9 % zakje en hang deze aan de infuuspaal.
2. Haal het infuussysteem uit de verpakking, sluit eventueel het groene lipjes bij de naald en sluit de witte klemmetjes. Het wielkje van de roller, waarmee het systeem open en dicht gezet kan worden, staat open (= naar boven)
3. **Bevestig het nieuwe filter aan het eind van het infuussysteem (zie foto).**
4. Verwijder beschermhoes van de spike (=naald) en steek de naald van het infuussysteem in de NaCl 0,9 % zak.
5. Hou de druppelkamer (ook wel klokhuis genoemd) omgekeerd en zet het witte klemmetje open.
6. Vul de druppelkamer totdat deze voor $\frac{3}{4}$ gevuld is.
7. Draai de druppelkamer weer terug en laat de rest van het systeem vollopen, **door het filter heen** tot de hele lijn gevuld is.
8. Eventuele luchtbelllen kunt u verwijderen door het infuus nog even te laten lopen. Draai de roller nu dicht (= naar beneden).
9. Het infuussysteem is nu klaar voor gebruik !